

| 検査項目 | 材 料 | 採取容器 | 保存法および保 存期間 | |
|------|---------------------|--------|----------------|---|
| 細菌 | 大腸菌O-157 | 便 | 嫌気ポーター(嫌気ポ) | 冷蔵庫(4℃) 7日 |
| | 大腸菌ベロ毒素 | 便 | 嫌気ポーター(嫌気ポ) | 冷蔵庫(4℃) 7日 |
| | C.d i f f i c i l e | 便 | 嫌気ポーター(嫌気ポ) | 冷蔵庫(4℃) 3日 |
| | A群溶連菌 | 咽頭ぬぐい液 | 滅菌綿棒(綿棒) | 冷蔵庫(4℃) 3日 |
| | 髄膜炎菌 | 髄液 | 滅菌試験管(試験管) | 冷蔵庫(4℃) 2日 凍結(-18℃) 10日 |
| | レジオネラ | 尿 | 滅菌試験管(試験管) | 冷蔵庫(4℃) 14日 |
| | 肺炎球菌 | 尿 | 滅菌試験管(試験管) | 冷蔵庫(4℃) 14日 |
| 真菌 | β-D-グルカン血液 | 血液 | E・Gチューブ(E G管) | 全血: 冷蔵庫1日 遠心分離後: 冷蔵庫3日 血漿: 凍結(-80℃) 30日 |
| | カンジダ | 血液 | 分離剤入り(分離剤) | 全血: 冷蔵庫2日 血清: 凍結(-18℃) 30日 |
| | アスペルギルス | 血液 | 分離剤入り(分離剤) | 全血: 冷蔵庫2日 血清: 凍結(-18℃) 30日 |
| | クリプトコッカス | 血液 | 分離剤入り(分離剤) | 全血: 冷蔵庫2日 血清: 凍結(-18℃) 30日 |
| ウイルス | ロタ・アデノ | 便 | 滅菌綿棒(綿棒) | 冷蔵庫(4℃) 7日 |
| | インフルエンザ | 鼻咽腔 | 滅菌綿棒(綿棒) | 冷蔵庫(4℃) 1日 |
| | R Sウイルス | 鼻咽腔 | 滅菌綿棒(綿棒) | 冷蔵庫(4℃) 3日 |
| その他 | 赤痢アメーバ | 便 | 嫌気ポーター(嫌気ポ) | 保存不可 |
| | クラミジア・トラコマチス | 分泌物 | 滅菌綿棒(クラ棒) | 冷蔵庫(4℃) 5日 |

※β-D-グルカンの検体を血漿分離する際は、エンドトキシンフリーのチップと試験管(E・Gチューブ)を用いる